

# Technical Update:

## Complete D 25-OH Vitamin D Control



Tech number: 206-17-29-1

Users: All Complete D 25-OH Vitamin D Control Users • Date issued: 07/28/17

### English

The Complete D<sup>®</sup> 25-OH Vitamin D Control has been enhanced by the addition of ranges for the Siemens Dimension<sup>®</sup> EXL<sup>™</sup> LOCI<sup>®</sup> Vitamin D Total Assay. (Please see Table 1 for the ranges.)

### German

Die Complete D<sup>®</sup> 25-OH Vitamin D Control wurde durch die Bereiche des Siemens Dimension<sup>®</sup> EXL<sup>™</sup> LOCI<sup>®</sup> Vitamin D Total Assay erweitert. (Die Bereiche entnehmen Sie bitte Tabelle 1.)

### French

Le Complete D<sup>®</sup> 25-OH Vitamin D Control a été optimisé avec l'ajout des plages du Siemens Dimension<sup>®</sup> EXL<sup>™</sup> LOCI<sup>®</sup> Vitamin D Total Assay. (Référez-vous au Tableau 1 pour voir ces plages.)

### Italian

Il Complete D<sup>®</sup> 25-OH Vitamin D Control è stato migliorato con l'aggiunta degli intervalli per il Siemens Dimension<sup>®</sup> EXL<sup>™</sup> LOCI<sup>®</sup> Vitamin D Total Assay. (Per gli intervalli, consultare la Tabella 1.)

### Spanish

Se ha mejorado el Complete D<sup>®</sup> 25-OH Vitamin D Control con la adición de los rangos para el Siemens Dimension<sup>®</sup> EXL<sup>™</sup> LOCI<sup>®</sup> Vitamin D Total Assay. (Consulte la Tabla 1 para obtener información sobre los rangos.)

**Table 1 / Tabelle 1 / Tableau 1 / Tabella 1 / Tabla 1**

	Units	Level 1 / Lot 29131		Level 2 / Lot 29132		SI Units <sup>1</sup>	Level 1 / Lot 29131		Level 2 / Lot 29132		
		mean	expected range	mean	expected range		mean	expected range	mean	expected range	
<b>Total 25-Hydroxyvitamin D</b>											
SIEMENS Dimension <sup>®</sup> EXL	ng/mL	17.7	14.2 – 21.2	48.7	39.0 – 58.4	nmol/L	43.5	34.9 – 52.1	119.8	95.9 – 143.6	